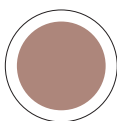
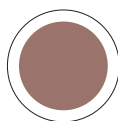
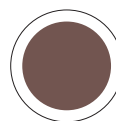
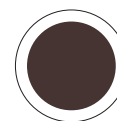
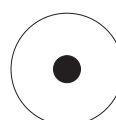
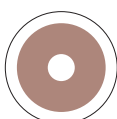
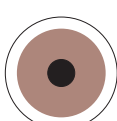
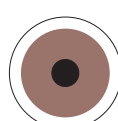


Bảng màu kính áp tròng mềm SEED Iris

Màu Loại	Nâu (A)	Nâu (B)	Nâu (C)	Nâu (C+)	Đen (D)	Kê đơn kính	
						Kính + (bao gồm $\pm 0.00D$)	Kính -
No.1						Có thể	Không kê với (D)
	■ Đường kính mỏng mắt: 9.5 mm-12.5 mm (bước nhảy 0.5 mm)/Thiết kế cần có viền trong suốt trên 2.0mm						
No.2						Có thể	Không thể
	■ Đường kính đồng tử: vòng tròn đen ở trung tâm 2.5mm - 9.0mm (bước nhảy 0.5mm)						
No.3						Có thể	Có thể
	■ Đường kính mỏng mắt: 9.5 mm - 12.5 mm (bước nhảy 0.5 mm)/ Thiết kế cần có viền trong suốt trên 2.0mm ■ Đường kính đồng tử: Vòng tròn trong suốt ở trung tâm: 2.0mm - 5.5mm (bước nhảy 0.5mm)					Kính + ■ Đường kính mỏng mắt: 9.5 mm - 12.5 mm (bước nhảy 0.5mm)/ Thiết kế cần có viền trong suốt trên 2.0mm ■ Đường kính đồng tử: Vòng tròn trong suốt ở trung tâm 2.5mm - 4.5mm (bước nhảy 0.5mm) Kính - (bao gồm $\pm 0.00D$) ■ Đường kính mỏng mắt: 9.5mm - 12.5mm(bước nhảy 0.5mm)/ Thiết kế cần có viền trong suốt trên 2.0mm ■ Đường kính đồng tử: Vòng tròn trong suốt ở trung tâm 1.5mm - 6.5mm (bước nhảy 0.5mm)	
No.4						Có thể	Không kê với (D)
No.5						Có thể	Không thể
	■ Đường kính mỏng mắt: 9.5mm - 12.5mm (bước nhảy 0.5mm)/Thiết kế cần có viền trong suốt trên 2.0mm ■ Đường kính đồng tử: vòng tròn đen ở trung tâm 2.5mm - 9.0mm (bước nhảy 0.5mm)						

Thông tin sản phẩm

Bán kính cong	8.00mm, 8.30mm, 8.60mm, 8.90mm, 9.20mm
Dải độ	$\pm 0.00D \sim \pm 10.00D$ (bước nhảy 0.25D) $\pm 10.50D \sim \pm 25.00D$ (bước nhảy 0.50D)
Đường kính	12.0mm - 15.0mm (Thay đổi tùy theo bán kính cong, bước nhảy 0.5mm) BC: ở BC8.00mm là 12.0mm - 13.5mm, ở BC8.30 mm là 12.0mm - 14.0mm, ở BC8.6 mm là 12.0 mm- 14.5mm, ở BC8.60mm là 12.0mm - 15.0mm, ở BC9.20mm là 12.0mm - 15.0mm
Đường kính mỏng mắt	Thay đổi tùy theo từng loại, vui lòng xem bảng trên
Đường kính đồng tử	Thay đổi tùy theo từng loại, vui lòng xem bảng trên
Màu mỏng mắt	Màu nâu 4 loại (A,B,C,C+), màu đen 1 loại (D)

- ※ Chúng tôi cố gắng in giống màu sắc thật của sản phẩm nhiều nhất có thể, tuy nhiên do chất lượng in ấn, màu sắc thực tế có thể thay đổi ít nhiều
- ※ Xin lưu ý rằng cảm giác khi đeo kính của mỗi người sẽ ít nhiều thay đổi
- ※ Xem thêm thông tin sản phẩm tại www.seedvietnam.com

SEED®

IRIS LENS

【Cách vệ sinh kính áp tròng (sử dụng dung dịch ngâm rửa kính)】

Trước khi sử dụng (đeo hoặc tháo) kính áp tròng, hãy luôn nhớ rửa tay thật sạch bằng xà phòng và xả thật kỹ.


Chà rửa kính

- ① Đặt kính vào lòng bàn tay, thêm vài giọt dung dịch ngâm rửa kính và rửa tròng kính bằng cách dùng đầu ngón tay chà sát kính.
- ② Chà từng mặt của kính theo cùng một hướng lên và xuống hoặc trái qua phải trong ít nhất 10 giây.




Rửa sạch kính

- ③ Rửa sạch các mặt của kính sau khi vệ sinh với một lượng dung dịch vừa đủ, kiểm tra xem có dị vật nào còn sót lại trên bề mặt kính hay không.

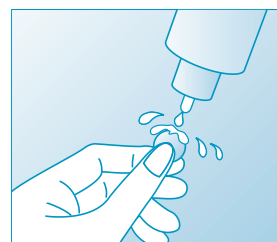


Bảo quản & khử trùng

- ④ Đổ đầy dung dịch mới vào hộp đựng kính, ngâm kính ngập trong dung dịch, đóng chặt nắp và ngâm trong khoảng thời gian tối thiểu được quy định trong hướng dẫn sử dụng.

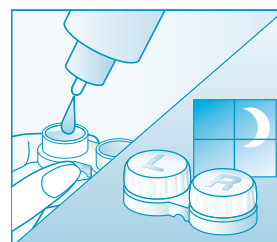

Rửa sạch kính trước khi đeo

- ⑤ Khi đeo kính, hãy luôn rửa tay và rửa sạch kính bằng dung dịch trước khi đeo.

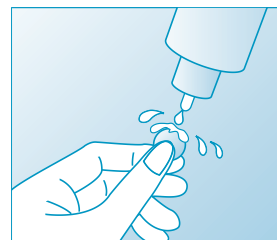

- ⑥ Hãy đổ hết nước trong hộp đựng kính áp tròng sau khi tháo, vệ sinh – rửa sạch bằng dung dịch ngâm rửa kính rồi để khô tự nhiên. Hãy thường xuyên thay mới hộp đựng kính.
- ⑦ Trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm chăm sóc kính áp tròng nào, hãy luôn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tờ hướng dẫn đi kèm kính áp tròng. Đối với những sản phẩm của SEED, vui lòng tham khảo <https://seedvietnam.com/>.

【Những lưu ý khi sử dụng kính】

Vui lòng tuân thủ hướng dẫn sử dụng bên dưới, tránh trường hợp màu của kính bị mờ đi một cách nhanh chóng:

- ① Không sử dụng trộn lẫn nhiều loại sản phẩm chăm sóc kính áp tròng khác nhau.
- ② Không ngâm kính trong chất tẩy protein lâu hơn thời gian quy định.
- ③ Không sử dụng các sản phẩm chăm sóc kính áp tròng có chứa hypochlorous acid.
- ④ Không sử dụng mỹ phẩm dạng xịt hoặc chất tẩy rửa gia dụng (chất tẩy mốc, thuốc tẩy, v.v.) khi đang đeo kính.
- ⑤ (Không đeo kính tại môi trường có chứa dung môi dễ bay hơi.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo <https://seedvietnam.com/>.